



ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ



Οδηγίες Χρήσης-Συναρμολόγησης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

- Ανασήκωση από το κρεβάτι

1. Προετοιμάστε την καρέκλα αφαιρώντας την προσθαφαιρούμενη πλάτη πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ανασήκωσης .



Με τον χειριστήριο ανεβάστε την σε τέτοιο ύψος που να ταιριάζει στο κρεβάτι σας .

2. Εάν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε με αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλο κάθισμα ρυθμίστε το πλάτος της βάσης ανάλογα με το πλάτος του αμαξιδίου



Τοποθετήστε το κάθισμα στον ασθενή ενώ είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι

3. Φέρτε την καρέκλα κοντά στον ασθενή ώστε να μπορείτε γρήγορα να συνεχίσετε την διαδικασία. Φέρτε τον ασθενή σε καθιστή θέση στην άκρη του κρεβατιού με το κάθισμα κάτω από τους γλουτούς.

4. Στην συνέχεια περάστε την καρέκλα στον ασθενή και τοποθετήστε την πλάτη στην καρέκλα. Έτσι ο ασθενής είναι καθιστός και ασφαλής στην καρέκλα.

5. Ενώστε τους ιμάντες με το κάθισμα όπως κάνετε με την ζώνη του αυτοκινήτου.



6. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχουν κουμπώσει σωστά πατήστε το χειριστήριο μέχρι ο ασθενής να αποσπαστεί από το κρεβάτι. Είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε με την καρέκλα στον επόμενο προορισμό.

• Τοποθέτηση στο αμαξίδιο

1. Η ρύθμιση της βάσης πρέπει να έχει γίνει χωρίς τον ασθενή πάνω στην καρέκλα. Για να την ρυθμίσετε ξεβιδώστε τις πεταλούδες στην βάση και ανοίξτε τα πτυσσόμενα τμήματα στο πλάτος που επιθυμείτε. Εάν ο ασθενής βρίσκεται πάνω στην easygo και σεις θέλετε να ανοίξετε την τηλεσκοπική βάση, τοποθετήστε ένα καρεκλάκι κάτω από τον ασθενή, έτσι ώστε να μην υπάρχει φορτίο στην easygo και εύκολα να ανοίξετε την βάση εκατέρωθεν.

2. Στην συνέχεια και αφού έχετε σηκώσει τον ασθενή (βήματα 1-6) κυλήστε το αμαξίδιο μέσα στον σκελετό της καρέκλας και με το χειριστήριο κατεβάστε το μοτέρ έτσι ώστε το κάθισμα να κατέβει και να φτάσει στο επίπεδο του αμαξιδίου.

3. Όταν ο ασθενής καθίσει στο αμαξίδιο αφαιρέστε την πλάτη του easyGO (1) και τραβήξτε το. Ο ασθενής τώρα είναι καθισμένος στο αμαξίδιό του. Για να τον ξαναπάρτε ακολουθήστε την αντίθετη διαδικασία.

• Τοποθέτηση στην τουαλέτα

1. Για να φτάσετε στην λεκάνη της τουαλέτας αρκεί να ακολουθήσετε τα βήματα 1-6 χρησιμοποιώντας το κάθισμα με οπή (7) αντί του κανονικού υφασμάτινου.

2. Το προϊόν σας παραδίδεται σε τμήματα που συναρμολογούνται πολύ εύκολα. Το προϊόν είναι λειτουργικά μελετημένο έτσι ώστε να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται και να καθιστά εύκολη την αποθήκευσή του και μεταφορά του.

Παρουσίαση Προϊόντος

1) Αποσπώμενη πλάτη με κάλυμμα.



2) Μπράτσα στήριξης των χεριών με κάλυμμα, αποσπώμενα μέσω ειδικού μοχλού (Δεξί/Αριστερό)



3) Κυρίως σώμα easygo.



4) Βάσεις με ροδάκι τηλεσκοπικά ανοιγόμενες και ασφαλιζόμενες με αντίστοιχες προσθαφαιρούμενες πεταλούδες (βίδες). Δεξιά / Αριστερή



5) Μοτέρ (εμβολο) με ενσωματωμένο στο πάνω άκρο κύλινδρο περιστροφής .



6) Μπαταρία με : καλώδιο Φόρτισης. Ενδεικτικές λυχνίες Φόρτισης/Λειτουργίας. Διακόπτη Ασφαλείας (κόκκινο μπουτον) . Προειδοποιητικό σήμα για Φόρτιση. Κουμπί για χαμήλωμα έκτακτης ανάγκης.



7) Χειριστήριο.



8) Κάθισμα από αδιάβροχο κάλυμμα.

9) Κάθισμα με οπή από αδιάβροχο κάλυμμα για χρήση τουαλέτας.



10) Ασφάλειες-Πύροι (2 τεμ) για το Εμβολο.



11) Πλαστικό κάλυμμα-υποπόδιο.



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

A) Στο κυρίως σώμα του easyGO (3) τοποθετήστε εκατέρωθεν τις βάσεις με τα ροδάκια(4) . Ασφαλίστε με τις δυο μαύρες πεταλουδες (βίδες).

B) Στην μπροστινή θέση του κυρίου σώματος που προεξέχουν 2 κάθετοι πύροι ,τοποθετήστε την μπαταρία στα σημεία που υπάρχουν οι αντίστοιχες τρύπες/υποδοχές.



Γ) Τοποθετήστε Το εμβολο με το μοτέρ στην κάτω θέση με κατεύθυνση να κοιτάζει προς τα εμπρός, στην αντίστοιχη υποδοχή που βρίσκεται στην μέση της βάσης του κυρίως σώματος. Ασφαλίστε με τον πύρο.



Δ) Το άλλο άκρο του εμβόλου τοποθετήστε το στην σωληνωτή υποδοχή που βρίσκεται στην οριζόντια λαβή χειρών του κυρίως σώματος. Ανασηκώστε ελαφρά, τοποθετήστε και ασφαλίστε με τον πύρο.



Ε) Ενώστε το καλώδιο του μοτέρ και του χειριστηρίου στις αντίστοιχες υποδοχές της μπαταρίας.



ΣΤ) Καλύψτε την μπαταρία με το Πλαστικό Καπάκι εφαρμόζοντας το στις αντίστοιχες πίσω υποδοχές. Το καπάκι κάνει και χρέη υποποδίου.

Ζ) Τοποθετήστε τα καλυμμένα μπράτσα στήριξης των χειρών με τους αναρτημένους ιμάντες στις αντίστοιχες υποδοχές του κυρίου σώματος. Προσέξτε οι ιμάντες με τις πόρπες ασφαλείας να είναι από την εξωτερική πλευρά της easygo.

Η) Τοποθετήστε την πλάτη.

Η Ειδική καρέκλα EasyGo είναι Έτοιμη προς χρήση.
Ακολουθήστε αντίστροφα τις κινήσεις για την αποσυναρμολόγηση της.
Δεν Χρειάζονται Εργαλεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Για Ανύψωση και χαμήλωμα πατήστε τα αντίστοιχα βελάκια (ενδείξεις) στο χειριστήριο. Η κίνηση σταματά όταν αφήνετε τα κουμπιά.

Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης. Βρίσκεται ενσωματωμένο στην μπαταρία. Ενεργοποιείτε πατώντας μια φορά. Επαναφέρατε το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης στρέφοντας το κατά την φορά που δείχνει το βέλος.

Ηλεκτρικό χαμήλωμα έκτακτης ανάγκης. Το Εμβολο της καρέκλας χαμηλώνει ηλεκτρικά με το πάτημα του κουμπιού που βρίσκεται πάνω στην μπαταρία με ένδειξη σε σχήμα βέλους. Εκεί όπου βρίσκονται και οι λυχνίες για τις ενδείξεις λειτουργίας και φόρτισης.

Μηχανικό χαμήλωμα έκτακτης ανάγκης. Το εμβολο της καρέκλας χαμηλώνει μηχανικά με περιστροφή του κυλίνδρου χαμηλώματος (στο άνω άκρο του εμβόλου) όπως δείχνει το βέλος. (δεξιόστροφα).

Ασφάλιση των τροχών. Προς αποφυγή όποιας κίνησης κατά την τοποθέτηση του ασθενή, πατήστε τον ποδομοχλο που βρίσκεται ενσωματωμένος στις δυο μπροστινές ρόδες. Κατά την ανύψωση/ανασήκωση του ασθενή οι τροχοί πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Απασφαλίστε πιέζοντας προς τα πάνω.

Ποτέ μην κινείτε την καρέκλα τραβώντας της από το εμβολο.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για να διασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας πρέπει να φορτίζεται τακτικά. Συνιστούμε τη φόρτιση κάθε βράδυ μετά την χρήση. Αν η καρέκλα δεν χρησιμοποιείται καθημερινά, συνιστούμε να πατάτε το κουμπί έκτακτης ανάγκης μετά την χρήση της. Με αυτό τον τρόπο διατηρείται το ρεύμα της μπαταρίας. Επί της μπαταρίας υπάρχουν δυο λυχνίες. Η πράσινη που ανάβει κατά την λειτουργία της καρέκλας και η πορτοκαλί που αναβοσβήνει κατά την φόρτιση. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση τότε παραμένει σταθερά αναμμένη έως ότου αφαιρεθεί το καλώδιο φόρτισης. Η μέγιστη φόρτιση επιτυγχάνεται μετά από περίπου 12 ώρες. Όταν η χωρητικότητα μπαταρίας είναι χαμηλή (απομένουν περίπου 2-10 φορές λειτουργίας) ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Σε αυτή την περίπτωση φορτίστε αμέσως την μπαταρία. Ποτέ μην φορτίζετε την μπαταρία σε υγρή επιφάνεια. Η μπαταρία Δεν φορτίζει εάν το μπουτον ασφαλείας (κόκκινος διακόπτης) είναι ενεργοποιημένος (πατημένος). Για την φόρτιση απλά συνδέστε το μαύρο καλώδιο σε μια ηλεκτρική πρίζα 100-240V και την άλλη άκρη στην αντίστοιχη υποδοχή της μπαταρίας. Λάβετε υπό όψιν σας ότι η καρέκλα easyGo δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το καλώδιο φορτιστή είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

Όλα του τα Ηλεκτρονικά του μέρη. Εμβολο, Μπαταρία , χειριστήριο είναι ευρωπαϊκού εργοστασίου και πιστοποιημένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



- 1) Το μέγιστο βάρος ασθενή που ανασηκώνει η easyGo είναι στα 110 κιλά.
- 2) Πριν από κάθε χρήση παρακαλούμε κάνετε έναν προληπτικό έλεγχο στους ιμάντες.
- 3) Το ηλεκτρικό μοντέλο easyGo δεν πρέπει να εκτίθεται σε τρεχούμενο νερό.
- 4) Κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης. Βρίσκεται ενσωματωμένο στην μπαταρία.

- 5) Η μπαταρία Δεν φορτίζει εάν το μπουτον ασφαλείας (κόκκινος διακόπτης) είναι ενεργοποιημένος (πατημένος)



Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-8044499 | www.medifull.gr | info@medifull.gr